

U.O.C. di Ginecologia e Ostetricia
Direttore : Prof. Giovanni B. Nardelli

PROCEDURA OPERATIVA
Sanificazione e Disinfezione
della vasca
per travaglio / parto in acqua

Preparato da

Ref. Gruppo di lavoro Sala Parto Clinica Ostetrica

Verificato da

Servizio Qualità Azienda Ospedaliera
M.L.Chiozza.....
Unità di Valutazione Tecnologie Sanitarie
M.Castoro.....
Comitato per la Pratica Etica
R.Pegoraro.....

**Verificato per
validazione**

Direzione Medica
M.Grattarola.....

Approvato da

Direzione Sanitaria
G.P.Rupolo.....
Direttore UOC-GO
G.B.Nardelli.....
Coordinatrice Sala Parto
R.Ciullo.....

Data 25/01/2010

Rev. 00

Data 30/07/2010

Rev. 01

INDICE

1. GRUPPO DI LAVORO
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI NORMATIVI
4. GLOSSARIO E ACRONIMI
5. MODALITA' OPERATIVE
6. RESPONSABILITA' / DIAGRAMMA DI FLUSSO
7. TEMPI DI ATTUAZIONE
8. BIBLIOGRAFIA
9. ALLEGATI

01. Gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro è composto da:

Ostetriche della sala parto: Albertin Mariassunta, Baccarin Gigliola, Callegaro Marialuisa, Ciullo Rosaria, Favaron Barbara, Gambalonga Ileana, Granci Martina, Marivo Francesca Maria, Massarotto Martino, Panizza Cristina, Sansone Laura, Zacchettini Chiara, Zanella Paola.

Ostetriche della sala cesarei: Bellinato Giorgia , Crepaldi Elena, Greco Anna, La Bella Barbara, Marobin Federica, Michelon Gloria, Miozzo Elena, Valerio Elena, Zoccarato Manuela

OSS: Benetti Veronica, Brusamolin Monica, Calgaro Marina, Pagin Stefania, Pescante Ada, Zago Stefania.

02. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento è stato elaborato per fornire indicazioni per la sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto al fine di tutelare la sicurezza delle pazienti, garantendo quella degli operatori e l'integrità del materiale (vasca e rubinetteria). Questa procedura è da applicare presso la sala parto della Clinica Ostetrica, prima dell'uso della vasca, dopo l'uso della vasca e come manutenzione ordinaria.

La procedura prevede 3 fasi:

1. sanificazione e/o disinfezione
 - sanificazione quotidiana (ogni 24 ore) ad opera dell'OSS (manutenzione ordinaria)

- sanificazione prima dell'utilizzo ad opera dell'OSS
 - sanificazione e disinfezione dopo l'utilizzo ad opera dell'OSS
2. registrazione delle operazioni eseguite
 3. verifica e controllo

Tale documento è rivolto al personale sanitario (ostetriche, OSS) che assistono le pazienti nel travaglio/parto in acqua.

03. RIFERIMENTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

- Decreto Legislativo 24 febbraio 1997 n° 47 "attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici". Suppl. ordinario G. U. n°54, 6 marzo 1997
- D.Lgs 19 settembre 1994, n°47 "attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

04. GLOSSARIO E ACRONIMI

Sanificazione: trattamento che si avvale dell'uso di detergenti per rimuovere sostanze estranee (polveri, secreti, escreti, ecc.) e di conseguenza ridurre la carica microbica presente su oggetti o superfici.

Disinfezione: processo che ha lo scopo di eliminare i microrganismi, ad esclusione delle spore batteriche o funginee, presenti su un substrato.

DPI: dispositivi di protezione individuale.

05. MODALITA' OPERATIVE

SANIFICAZIONE

Materiali per la sanificazione:

- guanti
- sovracamice
- detergente "Amon" diluiti all'1% (10 ml di prodotto "Amon" portati a 1000 ml di acqua)
- panno "assorbente"

Istruzione operativa: Sanificazione

- indossare sovracamice e guanti (DPI)
- spruzzare il detergente diluito in un panno
- passare su tutte le superfici della vasca e della rubinetteria
- sciacquare con abbondante acqua fredda finchè non si è certi di aver rimosso ogni residuo schiumoso
- asciugare la superficie con un panno pulito
- eliminare i DPI (se non si deve procedere con la disinfezione)
- lavare le mani
- registrare l'esecuzione delle sanificazione sul modulo (allegato 1) indicando: data, ora e firma dell'operatore che ha eseguito la procedura.

DISINFEZIONE

Durante la procedura di disinfezione la stanza deve rimanere chiusa e ben aerata (finestra aperta).

Materiali per la disinfezione:

- guanti
- sovracamice
- mascherina chirurgica
- sodio dicloroisocianurato Bionil compresse (60 compresse in 150 litri di acqua)
- asticella in plastica (per sciogliere le compresse)
- panno "assorbente"

Istruzione operativa: Disinfezione

- indossare sovracamice, guanti e mascherina chirurgica (DPI)
- riempire la vasca con acqua fredda fino al livello del troppo pieno
- prelevare con i guanti puliti e asciutti le compresse versandole nella vasca
- mescolare le compresse con l'asticella di plastica finchè non sono completamente sciolte
- lasciare agire il disinfettante per 60 minuti
- con un panno imbevuto della soluzione contenuta nella vasca passare tutte le superfici non esposte al disinfettante e lasciare asciugare
- svuotare la vasca (trascorsi i 60 minuti)
- sciacquare con abbondante acqua fredda
- asciugare la superficie con un panno pulito
- eliminare i DPI
- lavare le mani

PROCEDURA: sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto in acqua

- registrare l'esecuzione della disinfezione sul modulo (allegato 1) indicando: data, ora e firma dell'operatore che ha eseguito la procedura.

VERIFICA/CONTROLLO (da parte dell'ostetrica)

1. verifica:

- la compilazione del modulo per la registrazione dell'avvenuta sanificazione e/o disinfezione
- la presenza di sporco visibile
- presenza di alterazioni del materiale (macchie, scolorimento).

2. Registra la verifica eseguita apponendo la firma sul modulo (allegato 1)

Prima dell'uso della vasca per il travaglio/parto

1. verifica:

- la compilazione del modulo per la registrazione della'avvenuta sanificazione e/o disinfezione
- la presenza di sporco visibile
- presenza di alterazioni del materiale (macchie, scolorimento)

2. registra la verifica eseguita apponendo la firma sul modulo (allegato 1)

06. RESPONSABILITA'

RESPONSABILITÀ	ATTIVITÀ	RIFERIMENTI DODUMENTALI NOTI
OSS	<ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria quotidiana (ogni24 ore) • registrazione avvenuta sanificazione 	Modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto
OSS	<ul style="list-style-type: none"> • sanificazione prima dell'utilizzo • registrazione avvenuta sanificazione 	Modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto
OSS	<ul style="list-style-type: none"> • sanificazione e disinfezione dopo l'utilizzo • registrazione avvenuta sanificazione e disinfezione 	Modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto
Ostetrica sala parto	<ul style="list-style-type: none"> • ogni giorno verifica la corretta sanificazione e/o disinfezione della vasca 	Modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il

	<ul style="list-style-type: none"> • prima dell'uso della vasca per il travaglio controlla visivamente la pulizia e l'integrità della vasca • registrazione della verifica/controllo 	travaglio/parto
--	--	-----------------

07. TEMPI DI ATTUAZIONE

La seguente procedura entra in vigore a partire dal 22/03/2010

08. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Azienda Ospedaliera di Padova. Antisettici e disinfettanti guida all'uso. Padova, maggio 2002.

09. Allegati

Allegato 1 : modulo di registrazione sanificazione e disinfezione della vasca per il travaglio/parto.

Allegato 2 : Scheda tecnica e di sicurezza BIONIL